



Extensión esponja de baño con calzador.

De esta idea puede verse un
vídeo en

<https://youtu.be/sRqzrR0o1FQ>



Esta obra se publica bajo una
[Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)



Extensión esponja de baño con calzador.

Breve descripción

Extensión de esponja que ayuda a bañarse lavándose bien a personas que se les dificulte la movilidad para bañarse por si mismo

Para quién se hizo y con qué objeto

Para quienes no pueden llegar a sus piernas o espalda, consta extensión se facilita. Debe tener como mínimo capacidad de sostener la extensión.

Materiales y modo de funcionamiento

Calzador plástico largo.
Esponja de baño.
Manillar de bicicleta.
Encendedor o mechero.
Tijeras.
Silicona caliente.

Proceso de elaboración

Con las tijeras se recorta por un lado como un bolsillo dentro de la esponja. Luego tomamos el calzador y lo introducimos en la esponja y le agregamos pegante. Luego con la candela o encendedor calentamos el plástico para poder doblarlo como a 45 grados o el ángulo deseado por el usuario según su necesidad.

Ver vídeo con tutorial paso a paso:

<https://youtu.be/sRqzrR0o1FQ>

Precauciones

Si se le dificulta el agarre puede usarse una correa para sostenerlo mejor a la mano.

Autores y datos de contacto

Apellidos: Betancur Posada

Nombre: Felipe

Dirección: Carrera 41 ***

Ciudad: Medellín

País: Colombia

Teléfono: 3006000***

Correo electrónico :

contacto@todospodemosayudar.com

Galería de imágenes.



Materiales utilizados.



Abriendo la esponja para insertar el mango.



Insertando el mango.



Pegando el mango con silicona.



Colocando un engrosador en el mango.



Calentando el mango para doblarlo.



Doblando el mango.



La adaptación acabada.