



Férula para fumar.



Férula para fumar.

Breve descripción

Férula de termoplástico adaptada para personas con disfunción física que repercuten en la destreza manual.

Para quién se hizo y con qué objeto

La adaptación fue ideada para un usuario de nuestra Unidad de Día para Personas Mayores que presenta Ataxia lo cual le induce temblores en las manos y descoordinación de los movimientos finos, provocándole quemaduras a la hora de fumar.

Materiales y modo de funcionamiento

Los materiales necesarios son:

- Tira de termoplástico 2,5 x 25 cm,
- pistola de aire caliente/secador de pelo,
- calentador de agua,
- paleta ,
- toalla,
- tijeras,
- una regla,

Proceso de elaboración

Primeramente se recorta la tira de termoplástico, se calienta en el agua hasta que sea moldeable. A continuación se saca la tira y se dispone una toalla o trapo para absorber agua sobrante.

Luego este material sobre los dedos y el cigarro del

usuario para tomar la medida exacta.

Finalmente se retocan los bordes con la pistola de aire caliente.

Autores y datos de contacto

Nombre 1: Celia Sánchez Galán

Nombre 2: Fuensanta Bravo Rodríguez

Dirección: Avd./ Del Norte, nº 19

Código Postal: 29680

Ciudad: Estepona

País: España

Teléfono: 650215114 / 619709759

Correo electrónico: celiachuki@hotmail.com

Galería de imágenes



Vista general de la férula para fumar con cigarrillo.